

ESTE DOCUMENTO CONTÉM INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A UTILIZAÇÃO E A SEGURANÇA DO PRODUTO. LEIA-O ATENTAMENTE E CONSERVE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA. A ADAPTAÇÃO DAS LENTES DE CONTACTO DEVE SER SEMPRE EFETUADA POR UM PROFISSIONAL DA VISÃO. PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRETA DAS SUAS LENTES DE CONTACTO, É ESSENCIAL QUE SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO SEU PROFISSIONAL DA VISÃO, BEM COMO TODAS AS INSTRUÇÕES CONSTANTES DA ROTULAGEM.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Lentes de Contacto Esféricas não corretivas:

- Lentes de contacto hidrófilas FRESHLOOK® COLORS (phemfilcon A)
- Lentes de contacto hidrófilas FRESHLOOK® COLORBLENDS® (phemfilcon A)
- Lentes de contacto hidrófilas FRESHLOOK® DIMENSIONS (phemfilcon A)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

As lentes de contacto hidrófilas FRESHLOOK® são compostas por phemfilcon A a 45%, um copolímero hidrofílico de 2-hidroxietil metacrilato (HEMA) e 2-etoxietil metacrilato (EOEMA). As lentes de contacto têm um conteúdo em água de 55%. As lentes são embaladas em blisters individuais em solução-tampão isotónica borato-salina (ácido bórico / borato de sódio). A solução salina contém 0,005% de poloxamer.

As lentes de contacto FRESHLOOK® UV contêm um tipo de monómeros com propriedades de absorção de raios UV que foram incorporados na matriz do polímero da lente de contacto para absorver a luz ultravioleta (UV).

As lentes de contacto hidrófilas FRESHLOOK® COLORS e FRESHLOOK® COLORBLENDS® são tingidas com um revestimento intermitente contendo os seguintes pigmentos aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA (sós ou em combinação): violeta de carbazol, óxido de cromo, óxido de ferro, ftalocianina de cobre II, verde de ftalocianina, dióxido de titânio. As FRESHLOOK® COLORS estão disponíveis nas cores Blue (azul), Green (verde), Misty Gray (cinzento enevoado), Sapphire Blue (azul safira) e Violet (violeta) e Hazel (cor de avelã). As FRESHLOOK® COLORBLENDS® estão disponíveis nas cores Amethyst (ametista), Blue (azul), Brown (castanho), Gray (cinzento), Green (verde), Honey (cor de mel), Pure Hazel (cor de avelã), True Sapphire (safira), Turquoise (turquesa), Gemstone Green (verde olivina), Brilliant Blue (azul brilhante) e Sterling Gray (cinzento esterilino).

As lentes de contacto hidrófilas FRESHLOOK® DIMENSIONS são tingidas com um revestimento intermitente contendo os seguintes pigmentos aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA: violeta de carbazol, óxido de cromo, óxido de ferro, ftalocianina de cobre II, verde de ftalocianina. As FRESHLOOK® DIMENSIONS estão disponíveis nas cores Caribbean Aqua (azul tipo mar das Caraíbas), Pacific Blue (azul tipo Oceano Pacífico), e Sea Green (verde mar).

Parâmetros das Lentes de Contacto:

Diâmetro:	14,5 mm
Raio da curvatura:	médio
Potência:	0,00 D
Diâmetro da zona ótica:	7,0 – 8,0 mm

Propriedades físicas das Lentes de Contacto:

- Índice de refração: 1,41
- Transmitância da luz: mínimo de 95% a 600 nm
- Permeabilidade ao oxigénio (DK): 16,1 x 10⁻¹¹ (cm²/s) (ml O₂/ml x mm Hg), medida a 35°C (método Fatt)
- Conteúdo em água: 55%
- Transmitância da luz UV: < 10% T a 300 nm

ATUAÇÃO (Modo de ação)

Quando hidratadas e colocadas na córnea, as lentes de contacto FRESHLOOK® (phemfilcon A) com padrão de cor e sem potência de correção, misturam-se com a cor natural dos olhos para enaltecere ou alterar a aparência da cor dos olhos.¹

UTILIZAÇÃO PREVISTA

As lentes de contacto esféricas hidrófilas FRESHLOOK® (phemfilcon A), não corretivas, são de uso exclusivamente ocular em pessoas com os olhos saudáveis que queiram enaltecere ou alterar a aparência da cor dos olhos, devem ser usadas como determinado e adaptado pelo profissional da visão. As lentes são apenas para uso diário (menos de 24h enquanto acordado).

Utilização prevista específica para o desenho das lentes de contacto

Desenho das lentes de contacto	Utilização prevista – correção visual e enaltecimento de cor
Lentes esféricas sem potência de correção, coloridas	Enaltecimento ou alteração da aparência da cor dos olhos

PACIENTES-ALVO

A população-alvo para utilização das lentes de contacto esféricas hidrófilas FRESHLOOK® (phemfilcon A), não corretivas, inclui pessoas com olhos saudáveis que possam usar apropriadamente o dispositivo e sejam capazes de entender e seguir as instruções de uso, cuidados e segurança (ou que tenham um cuidador que atue em seu nome). As lentes de contacto incluem um padrão de cor (cosmeticamente coloridas) para indivíduos que queiram enaltecere ou alterar a aparência da cor dos olhos. As lentes de contacto são comumente utilizadas por adultos, jovens adultos e adolescentes. As crianças que utilizaram lentes de contacto, usaram-nas sob monitorização de um profissional da visão qualificado e supervisão parental.

INDICAÇÕES (UTILIZAÇÕES)

Enaltecimento ou alteração de cor

As lentes de contacto FRESHLOOK® COLORS, FRESHLOOK® COLORBLENDS®, e FRESHLOOK® DIMENSIONS (phemfilcon A), sem potência de correção, atuam de forma a enaltecere ou alterar a aparência da cor dos olhos.

Regime de utilização

As lentes de contacto podem ser usadas em apenas 1 ou em ambos os olhos diariamente (menos de 24 horas enquanto acordado) ou como recomendado pelo profissional da visão. O período de utilização pode ir aumentando progressivamente até atingir o tempo máximo recomendável.

Regime de substituição

Em geral, as lentes de contacto FRESHLOOK (phemfilcon A) são de substituição mensal. O regime de substituição para cada indivíduo deve ser determinado por um profissional da visão e pode ser mais curto que o período máximo de 1 mês.

CONTRAINDICAÇÕES (Casos em que não deve utilizar este produto)

Não utilize as lentes de contacto (phemfilcon A) quando se verificarem as seguintes situações:

- Alergia, inflamação, infeção ou irritação ocular ou em torno do(s) olho(s) ou pálpebra(s)
- Película lacrimal inadequada (secura ocular)
- Hipoestesia da córnea (sensibilidade reduzida da córnea)

¹ A expressão “cor dos olhos” ao longo deste folheto refere-se à cor da íris. As lentes de contacto modificam a aparência apenas da zona colorida do olho (íris).

- A utilização de qualquer medicação sistémica ou de uso tópico que interfira com a utilização das lentes de contacto, incluindo medicações oftálmicas
- Qualquer doença sistémica que interfira com ou possa ser agravada pela utilização, manuseamento e/ou cuidados das lentes de contacto de forma segura
- Se os olhos ficarem vermelhos ou irritados

ADVERTÊNCIAS

- As lentes de contacto de uso diário não estão indicadas para utilizar durante o sono. As lentes de contacto de Phemfilcon A devem ser retiradas antes de ir dormir.
- As lentes de contacto, mesmo que usadas por motivos estéticos, são dispositivos médicos pelo que só devem ser utilizadas sob direção e supervisão de um profissional da visão.
- Problemas oculares graves, incluindo úlceras corneanas (queratites ulcerosas), podem desenvolver-se rapidamente e levar à perda de visão.
- O uso de lentes de contacto aumenta o risco de infeções oculares. Dormir com as lentes e/ou o tabagismo aumenta o risco de queratite ulcerosa em utilizadores de lentes de contacto (Cutter, 1996; Schein, 1989).
- Se o doente sentir desconforto ocular, sensação de corpo estranho, produção excessiva de lágrima, perturbações da visão, vermelhidão do olho ou outros problemas oculares, deve retirar imediatamente as lentes e entrar em contacto, assim que possível, com o seu profissional da visão.
- Problemas com as lentes de contacto e com os produtos de manutenção de lentes de contacto podem resultar em graves lesões oculares. Para a correta utilização e manutenção das suas lentes e dos produtos para o seu tratamento, é essencial que os utilizadores sigam as instruções do seu profissional da visão e todas as instruções de utilização constantes na rotulagem.
- Líquidos não estéreis (como, por exemplo, água da torneira, água destilada, soluções salinas feitas em casa ou saliva) não devem ser utilizados em lugar de nenhum componente no processo de cuidado das lentes de contacto. A utilização de água da torneira e água destilada tem sido associada à queratite *Acanthamoeba*, uma infeção da córnea resistente ao tratamento e à cura.

Emergências Gerais:

Se químicos de qualquer tipo (produtos domésticos, soluções de jardinagem, químicos de laboratório, etc.) entrarem nos olhos:

- Enxague os olhos imediatamente com uma solução salina (soro fisiológico) ou com água da torneira.
- Remova e descarte as lentes e entre imediatamente em contacto com o seu profissional da visão ou dirija-se às urgências hospitalares.

PRECAUÇÕES

Precauções especiais para o profissional da visão:

- Ao escolher o design e os parâmetros de lente de contacto adequados, o profissional da visão deverá ter em consideração todas as características da lente que poderão afetar o seu desempenho e a saúde ocular, incluindo a permeabilidade ao oxigénio, a espessura central e periférica e o diâmetro da zona ótica.
- As lentes de teste usadas na adaptação devem ser descartadas depois da utilização e não devem reutilizadas.
- A saúde ocular do doente e o desempenho da lente de contacto deverão ser cuidadosamente avaliados no momento da primeira consulta e devem ser monitorizados regularmente pelo profissional da visão responsável pela prescrição.
- A fluoresceína, um corante amarelo, não deverá ser usada enquanto as lentes de contacto estiverem colocadas no olho do paciente. As lentes absorvem o corante e ficam descoloridas.
- As lentes de contacto cosmeticamente coloridas podem reduzir a visibilidade em condições de baixa luminosidade.
- Os diabéticos poderão apresentar sensibilidade reduzida da córnea, pelo que são mais propensos a lesões, as quais demoram mais tempo a sarar do que as dos não diabéticos.
- Podem ocorrer alterações visuais ou alterações relativas à tolerância às lentes durante a gravidez ou durante a utilização de contraceptivos orais. Alerta as suas pacientes.
- Os profissionais da visão deverão dar indicações aos doentes para retirarem as lentes de imediato se o olho ficar vermelho ou irritado.
- Antes do final da consulta com o profissional da visão, os doentes devem ser capazes de conseguir retirar as lentes de contacto ou deverão ter alguém disponível que as possa retirar.
- Os exames oculares de rotina são necessários para garantir a saúde ocular dos doentes. A Alcon recomenda que os doentes visitem o seu profissional da visão uma vez ou mais por ano, conforme recomendado pelo mesmo.

Precauções para a utilização de lentes de contacto:

- Observe diariamente os seus olhos para se certificar de que têm um aspeto saudável, que se sente confortável e que a sua visão é nítida.
- Não utilizar se a embalagem do blister estiver aberta ou danificada, pois pode resultar em contaminação do produto que pode levar a infeção ocular grave.
- Se a embalagem do blister for acidentalmente aberta antes de se querer utilizar a lente de contacto, a lente deve ser conservada num estojo limpo próprio para lentes de contacto. Os produtos para cuidados de lentes de contacto não são todos iguais, por isso siga as instruções do fabricante respeitantes ao armazenamento, limpeza e desinfeção das lentes antes de as usar.
- Este produto contém nos seus componentes ácido bórico / borato de sódio que são seguros se o produto for utilizado de acordo com as instruções da rotulagem.
- Para a manutenção da saúde dos olhos, o regime de utilização das lentes deve ser determinado por um profissional da visão. Não utilize lentes de contacto hidrófilas phemfilcon A enquanto dorme.
- Não partilhe as suas lentes de contacto com ninguém, sob risco de propagação de microrganismos que poderão causar graves problemas para a saúde ocular.
- Nunca permita que as lentes entrem em contacto com líquidos não estéreis (nomeadamente água da torneira e saliva), sob risco de ocorrer uma contaminação microbiana, que poderá causar lesões oculares permanentes.
- Consulte o seu profissional da visão antes de utilizar lentes de contacto durante a prática de desporto, nomeadamente a natação e outras atividades aquáticas. A exposição à água (ou outros líquidos não estéreis) aquando da utilização de lentes de contacto em atividades tais como natação, esqui aquático e sauna, pode aumentar o risco de infeção ocular, incluindo, mas não limitado, a queratite por *Acanthamoeba*.
- Retire e descarte as suas lentes de contacto sempre que estiver exposto a vapores nocivos ou irritantes.
- Descarte qualquer lente de contacto que tenha ficado desidratada ou danificada. Substitua-a por uma lente nova.
- Os utilizadores de lentes de contacto devem consultar o seu profissional da visão pelo menos uma vez por ano, ou segundo a sua recomendação.
- Informe a sua entidade patronal que é utilizador de lentes de contacto, especialmente se o seu trabalho envolver a utilização de equipamentos de proteção ocular.
- Utilize com precaução sabões, loções, cremes, cosméticos ou desodorizantes, uma vez que em contacto com as lentes podem causar irritação.
- Coloque as suas lentes de contacto antes de se maquilhar e retire-as antes de se desmaquilhar.
- Não utilize as lentes após o prazo de validade.
- As lentes de contacto cosmeticamente coloridas podem reduzir a visibilidade em condições de baixa luminosidade.
- As lentes de contacto phemfilcon A contêm óxido de ferro, um corante de base metálica. Remova-as antes de se submeter a Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM ou RM).

EVENTOS ADVERSOS (Potenciais problemas e sua resolução)

É possível que a utilização de lentes de contacto cause complicações, acompanhadas por um ou mais dos seguintes sintomas:

- Sensação de corpo estranho no olho
- Desconforto causado pela lente de contacto
- Vermelhidão ocular
- Fotofobia (sensibilidade à luz)
- Ardor, sensação de picada, comichão ou olhos lacrimejantes
- Redução da capacidade de visão
- Arco-íris ou halos em torno das luzes
- Aumento das secreções oculares
- Desconforto ou dor
- Secura ocular severa ou persistente

Estes sintomas, se ignorados, podem levar a complicações mais graves.

O QUE FAZER SE SURTIR UM PROBLEMA

- Se ocorrer algum dos sinais ou sintomas referidos anteriormente:
 - Retire imediatamente a(s) lente(s) de contacto.
 - Se o desconforto ou problema desaparecer, verifique a(s) lente(s) de contacto.
 - Se a lente de contacto estiver de alguma forma danificada, não a coloque novamente no olho. Substitua-a por uma nova lente ou consulte o seu profissional da visão.
 - Se a lente de contacto estiver suja, tiver uma pestana, tiver um corpo estranho ou se o problema desaparecer e a lente de contacto parecer não estar danificada, limpe, enxague e desinfete a lente antes de a colocar novamente.
 - Se os sintomas acima referidos persistirem depois da remoção ou reinserção da lente, retire a lente de contacto imediatamente e consulte rapidamente o seu profissional da visão.
 - Pode estar perante uma condição grave como infeção, úlcera da córnea (queratite ulcerosa) ou irite.
 - Estas condições podem evoluir rapidamente e causar perda permanente da visão.
 - As reações menos graves como as abrasões, manchas epiteliais e conjuntivites bacterianas devem ser controladas e tratadas atempadamente para evitar complicações.
- A secura ocular ocasional pode ser aliviada pestaneando várias vezes ou através do uso de colírios lubrificantes aprovados para utilização com lentes de contacto hidrófilas. Se a secura ocular persistir, consulte o seu profissional da visão.
- Se a lente de contacto aderir ao olho (parar de se mover), aplique algumas gotas de colírio lubrificante e aguarde até que a lente volte a mover-se livremente no olho antes de tentar retirá-la. Se este problema persistir, consulte o seu profissional da visão.
- Se uma lente se deslocar no olho, volte a centrá-la procedendo da seguinte forma:
 - Feche os olhos e massage suavemente as pálpebras para que a lente volte à posição central, ou
 - Olhe na direção da lente e pestaneje, ou
 - Empurre a lente deslocada de novo para a córnea, pressionando suavemente com o dedo a extremidade da pálpebra superior ou inferior.
- Se uma lente se rasgar no olho, retire as partes da lente apertando-as entre os dedos, como faria normalmente para retirar a lente de contacto. Se tiver dificuldade em retirar as partes da lente, tome o devido cuidado para não apanhar o tecido ocular. Irrigue o olho com solução salina (soro fisiológico). Se ainda assim não conseguir, contacte o seu profissional da visão para assistência.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA E REGIME DE SUBSTITUIÇÃO

A utilização e o regime de substituição devem ser determinados pelo profissional da visão com base nas necessidades individuais e nas condições fisiológicas de cada doente. As lentes estão aprovadas apenas para uso diário e devem ser descartadas e substituídas por um novo par a cada mês, ou mais frequentemente, se recomendado pelo profissional da visão. As lentes devem ser desinfetadas com um sistema químico (não por temperatura).

USO DIÁRIO – menos de 24 horas enquanto acordado. O tempo de utilização pode ser constituído gradualmente até ser atingido o máximo recomendável.

As lentes devem ser removidas antes de dormir.

INSTRUÇÕES BASE PARA O CUIDADO DE LENTES DE CONTACTO

Cada lente de contacto é embalada estéril num blister selado em solução-tampão borato-salina. As mãos devem ser muito bem lavadas e secas com uma toalha limpa e isenta de fibras antes de tocar nas lentes. Para assegurar a esterilidade das lentes, o blister só deve ser aberto imediatamente antes de se usar as lentes. Para finalidades de teste e adaptação, as lentes devem ser descartadas depois da utilização e não podem ser reutilizadas.

- Cada vez que as lentes de contacto são removidas do olho antes da data de substituição, devem ser devidamente limpas, enxaguadas e desinfetadas antes de voltarem a ser colocadas. A limpeza é necessária para remover muco, filme lacrimal e contaminações da superfície da lente. O enxaguamento remove todos os vestígios de impurezas e detritos soltos. A desinfecção é necessária para eliminar microorganismos.
 - O profissional da visão deve recomendar e fornecer instruções para um regime de limpeza apropriado. Alguns métodos de desinfecção adequados incluem soluções de peróxido de hidrogénio. Siga sempre as instruções providenciadas pelo fabricante dos produtos de manutenção de lentes.
 - Os produtos de manutenção das lentes de contacto têm diferentes utilizações e instruções. Para evitar problemas oculares e danos às suas lentes de contacto, leia atenta e cuidadosamente as instruções do fabricante do(s) produto(s) que está a utilizar.
 - Muitos produtos de manutenção das lentes de contacto requerem um passo de esfregar e enxaguar. Se for este o caso, siga as instruções do fabricante do produto no que diz respeito à quantidade de solução e ao tempo que deve esfregar e enxaguar para reduzir o risco de infeções oculares graves.
- Imersão e conservação das lentes de contacto:
 - Renove sempre completamente a solução para manutenção das lentes cada vez que submerge (guarda) as suas lentes (solução nova, dentro do prazo de validade).
 - O período de conservação das suas lentes de contacto antes de ter que repetir os passos para limpar, enxaguar e desinfetar as lentes pode variar consoante o produto utilizado.
 - Nunca reutilize a mesma solução nem acrescente solução nova à solução já existente no seu estojo, pois diminuirá a sua eficácia de desinfecção e poderá conduzir a uma infeção ocular grave, perda de visão ou cegueira.

MANUSEAMENTO DAS LENTES DE CONTACTO

- Lave e enxague sempre cuidadosamente as mãos e seque-as completamente com uma toalha isenta de fibras limpa e seca antes de tocar nas lentes de contacto.
- Agite suavemente o blister de plástico (que contém um novo par de lentes) antes de o abrir.
- Retire a lente do blister (ou do estojo porta-lentes no caso de lentes já utilizadas) e coloque-a cuidadosamente na palma da mão.
- Certifique-se de que a lente não se encontra invertida e que tem a lente correta para cada olho.
- Verifique sempre as lentes antes de as colocar.
- Não coloque as lentes se estiverem danificadas ou sujas.

INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS LENTES DE CONTACTO

- Lave e enxague cuidadosamente as mãos e seque-as completamente com uma toalha isenta de fibras limpa e seca antes de tocar nas lentes.
- Coloque a lente na ponta do dedo indicador direito ou esquerdo limpo e seco. Coloque o dedo médio da mesma mão perto das pestanas e puxe a pálpebra inferior para baixo.
- Use os dedos da outra mão para levantar a pálpebra superior.
- Coloque a lente diretamente no olho (córnea) e afaste suavemente o dedo da lente.
- Olhe para baixo e solte lentamente a pálpebra inferior.
- Olhe fixamente para a frente e solte lentamente a pálpebra superior.
- Pestaneje suavemente.

INSTRUÇÕES PARA A REMOÇÃO DAS LENTES DE CONTACTO

- Lave e enxague cuidadosamente as mãos e seque-as completamente com uma toalha isenta de fibras limpa e seca.
- Pestaneje várias vezes.
- Olhe para cima e utilize a ponta do dedo para deslizar a lente de contacto para a parte branca do olho.
- Retire a lente apertando-a suavemente entre o polegar e o dedo indicador, tendo cuidado para não apanhar o tecido ocular.
- Se a lente é difícil de remover, instile colírio lubrificante ou hidratante e tente novamente após alguns minutos.
- Nunca utilize pinças, ventosas, objetos pontiagudos ou as unhas para retirar as lentes de contacto do olho ou mesmo do blister.

Se tiver dificuldade em retirar as lentes de contacto (lente descentrada ou danificada), consulte *O QUE FAZER SE SURTIR UM PROBLEMA* na secção acima EVENTOS ADVERSOS.

INSTRUÇÕES BASE PARA O ESTOJO DAS LENTES DE CONTACTO

Existem vários tipos de estojos e soluções de manutenção para lentes de contacto, com diferentes propósitos e instruções de utilização. Alguns estojos destinam-se exclusivamente à conservação de lentes de contacto (por vezes designados como estojos porta-lentes ou estojos para guardar as lentes), enquanto outros são especificamente concebidos para conter um disco de neutralização para a limpeza com peróxido de hidrogénio e sistemas desinfetantes. Se não se

destinarem a ser utilizadas diariamente, as lentes que foram limpas e desinfetadas podem ser conservadas na embalagem fechada durante um período que varia consoante a solução e o estojo utilizados. Respeite sempre as instruções específicas fornecidas pelo fabricante dos produtos de manutenção para lentes de contacto utilizados.

- O profissional da visão deve instruir o doente sobre como utilizar a(s) solução(ões) de manutenção e o estojo de lentes recomendados.
- Os estojos das lentes de contacto podem ser uma fonte de crescimento de bactérias e requerer uma limpeza adequada, uma boa secagem e substituição para evitar a contaminação ou danificação das lentes:
 - Limpe o estojo com uma solução adequada para lentes de contacto e seque-o segundo as instruções do estojo das lentes. As instruções de secagem, como a secagem ao ar ou com um pano sem fibras, podem variar dependendo do estojo de lentes utilizado.
 - Substitua o estojo de lentes de contacto pelo menos uma vez a cada 3 meses ou segundo as recomendações do fabricante do estojo de lentes.
 - Substitua os estojos de lentes de contacto especificamente concebidos para conter um disco de neutralização segundo as instruções do fabricante ou mais cedo se as lentes limpas e desinfetadas provocarem ardor e uma sensação de picada.
 - Não armazene as suas lentes de contacto ou enxague o seu estojo com água ou qualquer outra solução não estéril. Utilize apenas uma solução desinfetante nova de modo a evitar a contaminação das suas lentes ou do estojo. A utilização de uma solução não estéril pode provocar uma infeção grave, perda de visão ou cegueira.

MATERIAL E EMBALAGEM

Cada lente de contacto é embalada num blister individual de plástico selado com alumínio, em solução-tampão borato-salina (ácido bórico / borato de sódio) e é esterilizado por vapor. A solução salina contém 0,005% de poloxamer. A embalagem é marcada com o raio de curvatura, diâmetro, potência, padrão de cor, código de lote, data de fabrico e data de validade.

As lentes de contacto são fornecidas esterilizadas em caixas de cartão contendo até 6 lentes individualmente seladas.

REFERÊNCIAS

Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *The New England Journal of Medicine*. 1989; 321 (12): 773-783.

ABREVIATURAS E SÍMBOLOS USADOS NA ROTULAGEM

ABREVIATURAS / SÍMBOLOS	DEFINIÇÕES
BC	Raio da curvatura
DIA	Diâmetro
PWR	Potência
D	Dioptria (potência da lente)
L	Esquerdo
R	Direito
	Contém cromóforos que absorvem os raios-ultravioleta (UV)
	Contém ácido bórico / borato de sódio
	Símbolo de licença de resíduos de embalagens
	Código de Lote
	Utilizar até
	Data de validade (Utilizar até)
	Esterilizado por vapor
	Código de duas letras para o idioma (exemplo mostrado: inglês)
	Atenção
	Consultar instruções de utilização
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Fabricante
	Data de fabrico
	Representante Autorizado na Comunidade Europeia
	Atenção: A Lei Federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo à classe médica ou sob sua indicação
	Não descarte as lentes de contacto na sanita nem na canalização



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX
76134-2099, EUA



Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands, Belgium

Alcon

© 2020 Alcon Inc.

*marca comercial da Alcon

Data de elaboração: 10/2020



91024467