

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ESTE FOLHETO CONTÉM INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA DO PRODUTO. LEIA-O ATENTAMENTE E CONSERVE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA. A ADAPTAÇÃO DAS LENTES DE CONTACTO DEVE SER SEMPRE EFETUADA POR UM PROFISSIONAL DA VISÃO. PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRETA DAS SUAS LENTES DE CONTACTO, É ESSENCIAL QUE SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO SEU PROFISSIONAL DA VISÃO, BEM COMO TODAS AS INSTRUÇÕES CONSTANTES DA ROTULAGEM.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (Nome):

- Lentes de contacto diárias PRECISION1™ (verofilcon A)
- Lentes de contacto PRECISION1™ for Astigmatism (verofilcon A) Com tecnologia de filtro UV

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O material da lente de contacto é constituído aproximadamente por 51% de água e 49% verofilcon A, um silicone que contém hidrogel. O corante Reactive Blue 247 é adicionado ao material das lentes de contacto para obter uma coloração azul clara em toda a lente para facilitar o manuseamento. Além disso, as lentes de contacto contêm um monómero de benzotriazol com filtro UV para bloquear a radiação UV. As características de transmitância são inferiores a 1% na faixa UVB de 280 nm a 315 nm e inferiores a 10% na faixa UVA de 316 nm a 380 nm para todo o intervalo de potência.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DESEMPENHO

Propriedades das lentes de contacto

- Índice de refração (hidratado): 1,4
- Transmitância da luz: > 90% (@ 640 nm, -3,00 D)
- Permeabilidade ao oxigénio (Dk): 90×10^{-11} (cm²/seg) (ml O₂/ml x mm Hg), medido a 35 °C (Dk intrínseco - método coulométrico)
- Conteúdo em água: 51% em peso em soro fisiológico normal

Curvas de transmitância

Lente de contacto PRECISION1™ (verofilcon A) vs. Córnea humana e cristalino humano

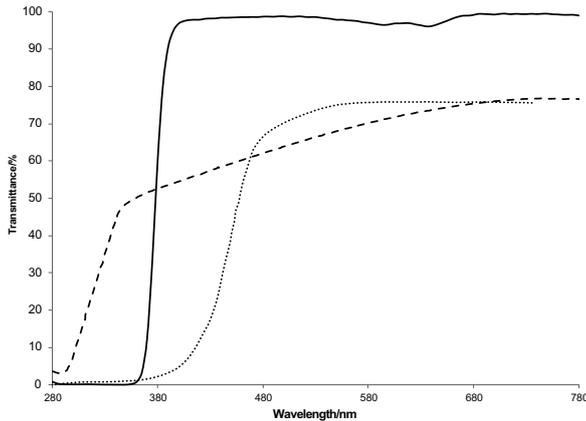

- Lente de contacto verofilcon A medida na parte central de 6 mm para a lente de contacto mais fina comercializada (espessura central de -3,00 D e 0,090 mm)
- Córnea humana de uma pessoa de 24 anos, tal como descrito em Lerman S., Radiant Energy and the Eye, MacMillian, New York, 1980, p.58, Figure 2-21.
- Cristalino humano de uma pessoa com 25 anos, tal como descrito em Waxler M., Hitchins V.M., Optical Radiation and Visual Health, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1986, p. 19, Figure 5.

ADVERTÊNCIA: As lentes de contacto que filtram raios UV não substituem os óculos de proteção para filtração de raios UV, como os óculos de proteção ou óculos de sol, porque não cobrem completamente o olho e a área circundante. O paciente deverá continuar a usar óculos de proteção com filtro de raios UV conforme indicado.

Parâmetros disponíveis das lentes de contacto

Lentes de contacto PRECISION1™ (verofilcon A) (esféricas)

- Diâmetro: 14,2 mm
- Espessura central: 0,09 mm @ -3,00 D (varia consoante a potência)
- Raio de curvatura e Potência:
 - Raio de curvatura: 8,3 mm
 - Potências negativas: -0,50 D a -6,00 D, (passos 0,25 D) -6,50 D a -12,00 D, (passos 0,50 D)
 - Potências positivas: +0,50 D a +6,00 D, (passos 0,25 D) +6,50 D a +8,00 D, (passos 0,50 D)
 - Raio de curvatura: 8,7 mm
 - Potências negativas: -0,50 D a -6,00 D, (passos 0,25 D) -6,50 D a -12,00 D, (passos 0,50 D)

Lentes de contacto PRECISION1™ for Astigmatism (verofilcon A) (tóricas)

- Diâmetro: 14,5 mm
- Espessura central: 0,10 mm @ -3,00 D (varia consoante a potência)
- Raio de curvatura: 8,5 mm
- Potência e eixo:
 - Esfera: +0,25 D a +4,00 D, (passos 0,25 D)
 - Cilindro: -0,75 D, -1,25 D, -1,75 D
 - Eixo: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
 - Cilindro: -2,25 D
 - Eixo: 10°, 20°, 160°, 170°, 180°
 - Esfera: Neutro (0,00 D) a -6,00 D (passos 0,25 D)
 - Cilindro: -0,75 D, -1,25 D, -1,75 D
 - Eixo: 10° a 180° (círculo completo, em passos de 10°)
 - Cilindro: -2,25 D
 - Eixo: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
 - Esfera: -6,50 D a -8,00 D, (passos 0,50 D)
 - Cilindro: -0,75 D, -1,25 D, -1,75 D
 - Eixo: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
 - Cilindro: -2,25 D
 - Eixo: 10°, 20°, 160°, 170°, 180°

ATUAÇÃO (modo de ação)

Quando hidratadas e colocadas na córnea, as lentes de contacto hidrófilas verofilcon A atuam como meio refrativo para focar os raios de luz na retina.

As lentes de contacto possuem um filtro UV para ajudar na proteção contra a transmissão de radiação UV prejudicial para a córnea e para o olho. As lentes de contacto PRECISION1™ mais finas (-3,00 dioptrias) filtram 93% da radiação UVA e 99% da radiação UVB. O filtro da radiação UV aumenta com lentes de contacto mais espessas.

NOTA: A exposição a longo prazo à radiação UV é um dos fatores de risco associado às cataratas. A exposição baseia-se numa série de fatores tais como condições ambientais (altitude, geografia, cobertura de nuvens) e fatores pessoais (extensão e natureza das atividades ao ar livre). As lentes de contacto com filtro UV ajudam a fornecer proteção contra a radiação UV nociva. No entanto, não foram realizados estudos clínicos para demonstrar que o uso de lentes de contacto com filtro UV reduz o risco de desenvolver cataratas ou outros problemas oculares. Consulte o seu profissional da visão para mais informações.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

As lentes de contacto hidrófilas verofilcon A estão indicadas para uso ocular em pessoas com olhos saudáveis que necessitem de correção visual como determinado por um profissional da visão.

Utilização prevista específica para o desenho das lentes de contacto (modelo)

Desenho das lentes de contacto (modelo)	Utilização prevista (no olho)
Lentes de contacto esféricas	Correção ótica da ametropia refrativa (miopia e hipermetropia)
Lentes de contacto tóricas	Correção ótica da ametropia refrativa (miopia e hipermetropia) com astigmatismo.

POPULAÇÃO-ALVO

A população-alvo para utilização das lentes de contacto hidrófilas verofilcon A (esféricas e tóricas) inclui pessoas com olhos saudáveis que requerem correção visual (miopia, hipermetropia e astigmatismo), que possam usar apropriadamente o dispositivo e sejam capazes de entender e seguir as instruções de utilização, cuidados e segurança (ou que tenham um cuidador que atue em seu nome). As lentes de contacto são comumente utilizadas por adultos e adolescentes. As crianças que utilizaram lentes de contacto, usaram-nas sob monitorização de um profissional da visão qualificado e supervisão parental.

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

As lentes de contacto hidrófilas verofilcon A proporcionam correção ótica da miopia, hipermetropia e astigmatismo, conforme determinado e adaptado por um profissional da visão.

As lentes de contacto com potência de correção proporcionam vantagens de desempenho face aos óculos, melhorando a visão periférica (lateral) e minimizando as diferenças no tamanho da imagem que ocorrem quando a potência de correção entre ambos os olhos não é a mesma.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

As lentes de contacto hidrófilas esféricas PRECISION1™ (verofilcon A) estão indicadas para a correção ótica da ametropia refrativa (miopia e hipermetropia) em olhos fáquicos ou afáquicos saudáveis com até aproximadamente 1,50 dioptrias (D) de astigmatismo que não interfira com a acuidade visual.

As lentes de contacto hidrófilas tóricas PRECISION1™ for Astigmatism (verofilcon A) estão indicadas para a correção ótica de ametropia refrativa (miopia e hipermetropia) em olhos fáquicos ou afáquicos saudáveis com até 6,00 dioptrias (D) de astigmatismo.

As lentes de contacto hidrófilas verofilcon A estão indicadas para uso único, são diárias e descartáveis (menos de 24 horas enquanto acordado).

CONTRAINDICAÇÕES (casos em que não deve utilizar este produto)

As lentes de contacto não devem ser usadas em determinadas condições ambientais ou de saúde. Condições que podem interferir ou impedir a utilização segura das lentes de contacto incluem:

- Alergia, inflamação, infeção ou irritação ocular ou em torno do olho ou pálpebras.
- Filme lacrimal inadequado (secura ocular).
- Hipoestesia da córnea (sensibilidade reduzida da córnea).
- Utilização de medicamentos contraindicados ou que interfiram com lentes de contacto, incluindo medicação ocular.
- Doenças sistémicas que possam ser agravadas pelas lentes de contacto ou que interfiram com a utilização das mesmas.
- Se os olhos ficarem vermelhos ou irritados.

Consulte o seu profissional da visão especificamente sobre estas ou outras condições.

ADVERTÊNCIAS

- As lentes de contacto de uso diário não estão indicadas para utilização durante o sono. As lentes de contacto verofilcon A não deverão ser usadas durante o sono.
- Problemas oculares graves, incluindo úlceras na córnea (queratite ulcerativa), podem desenvolver-se rapidamente e resultar em perda de visão.
- A utilização de lentes de contacto aumenta o risco de infeções oculares. Dormir com as lentes de contacto e/ou o tabagismo aumentam o risco de queratite ulcerativa nos utilizadores de lentes de contacto.^{1,2}
- Em caso de desconforto ocular, sensação de corpo estranho no olho, lacrimejo excessivo, alterações na visão, vermelhidão ocular ou outros problemas oculares, o utilizador deve ser aconselhado a retirar as lentes de contacto imediatamente e contactar o seu profissional da visão.
- Os problemas com as lentes de contacto e com os produtos de manutenção de lentes de contacto podem provocar lesões oculares graves. Para a correta utilização e manutenção das suas lentes de contacto, é essencial que os utilizadores sigam as instruções fornecidas pelo seu profissional da visão e todas as instruções de utilização constantes na rotulagem dos produtos.
- As lentes de contacto com filtro UV NÃO substituem os óculos de proteção para filtração de raios UV, como os óculos de proteção ou óculos de sol, porque não cobrem completamente o olho e a área circundante. O paciente deverá continuar a usar óculos de proteção com filtro UV conforme indicado.

PRECAUÇÕES

Precauções especiais para o profissional da visão

- Ao escolher o desenho e os parâmetros de lente de contacto adequados, o profissional da visão deverá ter em consideração todas as características da lente de contacto que possam afetar o desempenho das lentes de contacto e a saúde ocular, incluindo a permeabilidade ao oxigénio, a espessura central e periférica e o diâmetro da zona ótica.
- As lentes de contacto de prova (teste) usadas na adaptação devem ser descartadas depois da utilização e não devem reutilizadas.
- A saúde ocular do utilizador e o desempenho da lente de contacto deverão ser cuidadosamente avaliados no momento da primeira consulta e monitorizados regularmente pelo profissional da visão responsável pela prescrição.
- A fluoresceína, um corante amarelo, não deverá ser usada enquanto as lentes de contacto estiverem colocadas no olho do utilizador. As lentes de contacto absorvem o corante e ficam descoloradas.
- Os diabéticos poderão apresentar sensibilidade reduzida da córnea, pelo que são mais propensos a desenvolver lesões corneais, as quais demoram mais tempo a cicatrizar do que as dos não diabéticos.
- Podem ocorrer alterações visuais ou alterações relativas à tolerância às lentes de contacto durante a gravidez ou durante a utilização de contraceptivos orais. Alerta para estas situações em conformidade.
- Os profissionais da visão deverão aconselhar os seus utilizadores a retirar as lentes de contacto no imediato caso surja vermelhidão ou irritação ocular.
- Antes do final da consulta, os utilizadores deverão conseguir manusear as lentes de contacto (retirar e colocar) ou deverão ter alguém disponível que o possa fazer por eles.
- Os exames visuais de rotina são necessários para garantir a saúde ocular dos utilizadores. A Alcon recomenda que os utilizadores visitem o seu profissional da visão uma vez ou mais por ano, conforme recomendado pelo mesmo.

Precauções para a utilização de lentes de contacto

- Observe diariamente os seus olhos para se certificar de que têm um aspeto saudável, que se sente confortável e que a sua visão é nítida.
- Não utilizar se a embalagem do blister estiver danificada ou não estiver devidamente selada, pois pode resultar em contaminação do produto o que pode levar a infeções oculares graves.
- Se um blister de plástico for acidentalmente aberto antes de se pretender utilizá-lo, a lente de contacto deverá ser descartada. Caso contrário, poderá ocorrer contaminação do produto o que pode provocar uma infeção ocular grave.
- Para assegurar a sua saúde e segurança ocular, o período de utilização deve ser determinado pelo seu profissional da visão.
- As lentes de contacto não se destinam a ser limpas ou desinfetadas, mas sim descartadas após uma única utilização. A sua reutilização pode aumentar o risco de infeção ou fadiga induzida por danos na lente de contacto.
- Não partilhe as suas lentes de contacto com ninguém, sob risco de propagação de microrganismos que poderão causar graves problemas para a saúde ocular.

- Nunca permita que as lentes de contacto entrem em contacto com líquidos não estéreis (nomeadamente água da torneira e saliva), sob risco de ocorrer uma contaminação microbiana, que poderá causar lesões oculares permanentes.
- Consulte o seu profissional da visão antes de utilizar lentes de contacto durante a prática de desporto, nomeadamente natação e outras atividades aquáticas. A exposição à água (ou outros líquidos não estéreis) das lentes de contacto durante a prática de atividades como natação, esqui aquático ou em imersões com água quente pode aumentar o risco de infeção ocular incluindo, entre outros, a queratite por *Acanthamoeba*.
- Retire e elimine as lentes de contacto sempre que estiver exposto a vapores nocivos ou irritantes.
- Descarte qualquer lente de contacto que tenha ficado desidratada ou danificada. Substitua-a por uma lente de contacto nova.
- Os utilizadores de lentes de contacto devem consultar o seu profissional da visão pelo menos uma vez por ano, ou segundo a sua recomendação.
- Informe a sua entidade patronal de que é utilizador de lentes de contacto, especialmente se a sua atividade profissional envolver a utilização de equipamentos de proteção ocular.
- Tome nota das dioptrias corretas da lente de contacto para cada olho. Antes de colocar as lentes de contacto certifique-se de que as dioptrias indicadas no blister são as corretas para cada um dos olhos.
- Não altere o tipo ou os parâmetros da lente de contacto sem antes consultar o seu profissional da visão.
- Se interromper o uso das lentes de contacto por um período de tempo, consulte o seu profissional da visão antes de iniciar novamente a sua utilização.
- Utilize com precaução sabões, loções, cremes, cosméticos ou desodorizantes, uma vez que em contacto com as lentes podem causar irritação.
- Coloque as lentes de contacto antes de se maquilhar e retire-as antes de se desmaquilhar.
- Tenha sempre consigo lentes de contacto de substituição ou uns óculos de reserva para qualquer eventualidade.
- Não utilize as lentes de contacto após o prazo de validade.

EFETOS ADVERSOS (potenciais problemas e sua resolução)

É possível que a utilização de lentes de contacto origine complicações, acompanhadas por um ou mais dos seguintes sinais e sintomas:

- Sensação de corpo estranho no olho
- Desconforto causado pela lente de contacto
- Vermelhidão ocular
- Sensibilidade à luz (fotofobia)
- Ardor, sensação de picada, comichão ou lacrimejo
- Redução da nitidez visual
- Arco-íris ou halos em torno das luzes
- Aumento das secreções oculares
- Desconforto ou dor
- Secura ocular grave ou persistente

Estes sintomas, se ignorados, podem levar a complicações mais graves.

O QUE FAZER SE SURGIR UM PROBLEMA

Se ocorrer algum dos sinais ou sintomas referidos anteriormente, retire imediatamente a(s) lente(s) de contacto:

- Observe os olhos no espelho para verificar se existem sinais de alguma irregularidade.
 - Se o problema ou o desconforto desaparecer, coloque uma nova lente de contacto.
 - Se os sintomas descritos acima persistirem após a colocação da(s) nova(s) lente(s), retire-a(s) e contacte imediatamente o seu profissional da visão.

Pode estar perante uma condição grave como infeção, úlcera da córnea (queratite ulcerativa) ou irite. Estas condições podem evoluir rapidamente e causar perda visual permanente. As reações menos graves como as abrasões, ponteados epiteliais e conjuntivites bacterianas devem ser controladas e tratadas atempadamente para evitar complicações.

- A secura ocasional pode ser aliviada pestanejando várias vezes ou através da utilização de gotas oftálmicas lubrificantes aprovadas para utilização com lentes de contacto hidrófilas. Se a secura ocular persistir, consulte o seu profissional da visão.
- Se a lente de contacto aderir ao olho (parar de ter movimento durante o pestanejo ou movimentos oculares), aplique algumas gotas hidratantes e aguarde até que a lente de contacto volte a mover-se livremente no olho. Se este problema persistir, consulte o seu profissional da visão.
- Se uma lente de contacto se descentrar no olho, volte a centrá-la procedendo da seguinte forma:
 - Feche os olhos e massage suavemente as pálpebras para que a lente de contacto volte à posição central, ou
 - Olhe na direção da lente de contacto e pestaneje suavemente, ou
 - Mova delicadamente a lente de contacto deslocada de novo para a córnea, pressionando suavemente com o dedo na extremidade da pálpebra superior ou inferior.
- Se uma lente de contacto se rasgar no olho, retire as partes da lente de contacto apertando-as entre os dedos, como faria normalmente para retirar a lente de contacto. Se tiver dificuldade em retirar as partes da lente de contacto, tome o devido cuidado para não beliscar o tecido ocular. Irrigue o olho com soro fisiológico (solução salina) estéril para tentar retirar a lente de contacto novamente. Se ainda assim não conseguir, contacte o seu profissional da visão para lhe prestar auxílio.

Situações gerais de emergência:

Se algum químico de qualquer tipo (produtos domésticos, soluções de jardinagem, químicos de laboratório, etc.) entrar em contacto com os olhos:

- Enxague os olhos imediatamente com soro fisiológico (solução salina) ou água da torneira.

- Retire e descarte as lentes de contacto e entre imediatamente em contacto com o seu profissional da visão ou dirija-se às urgências hospitalares.

REPORTE DE INCIDENTES GRAVES

Qualquer incidente grave que se considere estar relacionado com estes dispositivos deve ser comunicado à Alcon Laboratories, Inc.:

Contacte o representante local do país ou o distribuidor da Alcon

E-mail: qa.complaints@alcon.com

Website: <https://www.alcon.com/contact-us>

Os incidentes graves devem também ser comunicados à autoridade competente do Estado-Membro aplicável.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Os utilizadores deverão usar um par de lentes de contacto novas a cada dia, que deverão depois ser descartadas no final do dia de utilização.

INSTRUÇÕES DE MANUSEAMENTO DAS LENTES DE CONTACTO

- Lave e enxague sempre cuidadosamente as mãos e seque-as completamente com uma toalha isenta de fibras, limpa e seca antes de tocar nas lentes de contacto.
- Agite suavemente o blister de plástico antes de o abrir.
- Retire a lente de contacto do blister e coloque-a cuidadosamente na palma da mão.
- Certifique-se de que a lente de contacto não se encontra invertida e que tem a lente correta para cada olho.
- Inspeccione sempre as lentes de contacto antes de as colocar.
- Não coloque as lentes de contacto se estiverem danificadas ou sujas.

INSTRUÇÕES PARA A INSERÇÃO DAS LENTES DE CONTACTO

- Lave e enxague cuidadosamente as mãos e seque-as completamente com uma toalha isenta de fibras, limpa e seca antes de tocar nas lentes de contacto.
- Coloque a lente de contacto na ponta do dedo indicador direito ou esquerdo limpo e seco. Coloque o dedo médio da mesma mão perto das pestanas e puxe a pálpebra inferior para baixo.
- Use os dedos da outra mão para levantar a pálpebra superior.
- Coloque a lente de contacto diretamente no olho (córnea) e afaste suavemente o dedo da lente de contacto.
- Olhe para baixo e solte lentamente a pálpebra inferior.
- Olhe fixamente para a frente e solte lentamente a pálpebra superior.
- Pestaneje suavemente.

INSTRUÇÕES PARA A REMOÇÃO DAS LENTES DE CONTACTO

- Lave e enxague cuidadosamente as mãos e seque-as completamente com uma toalha isenta de fibras, limpa e seca.
- Pestaneje várias vezes.
- Olhe para cima e utilize a ponta do dedo para deslizar a lente de contacto para a parte branca do olho.
- Retire a lente de contacto apertando-a suavemente entre o polegar e o dedo indicador, tendo cuidado para não beliscar o tecido ocular.
- Se tiver dificuldade em agarrar a lente de contacto, seque novamente os dedos e tente de novo. Nesta fase não deve usar gotas humectantes.
- Nunca utilize pinças, ventosas, objetos aguçados ou as unhas para retirar as lentes de contacto do olho ou mesmo do blister.

Se tiver dificuldade em retirar as lentes de contacto (lente descentrada ou danificada), consulte **O QUE FAZER SE SURGIR UM PROBLEMA**.

SOLUÇÕES DE MANUTENÇÃO PARA AS LENTES DE CONTACTO

As lentes de contacto descartáveis diárias verofilcon A não se destinam ao uso com produtos de manutenção para lentes de contacto. As lentes de contacto são para uma utilização única, apenas para uso diário descartável. As lentes de contacto não devem ser limpas ou desinfetadas e devem ser descartadas após uma única utilização. Tenha sempre disponíveis lentes de contacto para substituição ou óculos de reserva.

RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO

Deposite as lentes de contacto e a tampa de alumínio dos blisters no lixo, não deposite na sanita nem na canalização. A caixa de cartão e o blister de plástico polipropileno (PP) podem ser reciclados de acordo com a legislação local de gestão de resíduos, ou serem depositadas no lixo comum.

MATERIAL E EMBALAGEM (tal como fornecido)

Cada lente de contacto é embalada num blister de plástico selado, que contém solução-tampão fosfato-salina, com cerca de 0,3% de agentes humectantes poliméricos, compostos por copolímeros de poliamidoamina e poliacrilamida (ácido acrílico) e esterilizada por vapor. Nas embalagens estão identificados o raio de curvatura, o diâmetro, a potência dióptrica, o número de lote de fabrico, a data de fabrico e a data de validade.

As lentes de contacto são apresentadas estéreis em embalagens que contém até 90 lentes de contacto individualmente seladas.

ABREVIATURAS E SÍMBOLOS QUE PODEM CONSTAR NA ROTULAGEM DO PRODUTO

ABREVIATURA / SÍMBOLO	DEFINIÇÃO
BC	Raio de curvatura
DIA	Diâmetro
PWR	Potência
D	Dioptria (potência da lente)
L	Esquerdo
R	Direito
UV	Ultravioleta
UVA	Ultravioleta A
UVB	Ultravioleta B
CYL	Potência do cilindro
	Símbolo de licença de resíduos de embalagens
	Não reutilizar
	Código de lote
	Data limite de utilização
EXP	Data de validade (usar até)
	Sistema de barreira único estéril
	Esterilizado por vapor
	Marcação de Conformidade Europeia
	Inglês (exemplo do código de duas letras para o idioma)
	Advertência
	Consultar instruções de utilização
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Fabricante
	Data de fabrico
	Dispositivo médico
	Mandatário dentro da Comunidade Europeia
	Advertência: A Lei Federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo à classe médica ou sob sua indicação.



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, EUA

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands, Bélgica



Data de emissão: 06/2020

91024415-0620

Alcon

© 2020 Alcon Inc.

REFERÊNCIAS

¹ Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.

² Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.



91024415-0620